



Spiralverstärkte-Netzscheibe Spiral Reinforced Meshed Disc

Sicheres Separieren und Konturieren von Keramik, Gips und Kunststoff
Safe separation and contouring of ceramics, plaster and acrylics

Vorteile dieser Netzscheiben

- Hervorragende Flexibilität und gleichzeitige Stabilität durch das spiralverstärkte Design
- die grobe Diamantkörnung (D 054) ermöglicht einen hohen Materialabtrag
- Weiches und präzises Schleifen
- Die Perforation gewährleistet eine optimale Durchsicht bei gleichzeitig hohem Spantransport. Ebenfalls ermöglicht die Perforation einen kühlenden Lufttransport und eine niedrige Reibung.

Separieren und Konturieren von

- Keramik (Größe 180 und 220)
- Kunststoffen (Größe 180 und 220)
- Gips (Größe 400)

Optimale Drehzahlen:

- Größe 180/220: 20 000 min⁻¹
- Größe 400: 10 000 min⁻¹

The advantages of these Meshed Discs

- A combination of outstanding flexibility and exceptional stability, thanks to the spiral reinforced design
- The coarse diamond grit (D 054) allows efficient substance removal
- Gentle, yet precise grinding
- The perforation guarantees both optimum vision and excellent chip removal. What's more, it also enables the transport of cooling air and ensures low friction.

Separating and contouring of

- ceramics (sizes 180 and 220)
- acrylics (sizes 180 and 220)
- plaster (size 400)

Optimum speed:

- size 180/220: 20,000 rpm
- size 400: 10,000 rpm

990.104.

REF 990.104.	180	220	400
Größe · Size	180	220	400
Stärke · Thickness	0,27 mm	0,27 mm	0,37 mm
Belegung · Coating	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm

180/220 =  opt. 20.000 min⁻¹

400 =  opt. 10.000 min⁻¹

Drendel + Zweiling
DIAMANT GmbH
Schürenbreder Weg 27
32689 Kalletal · Germany

fon: +49 (0) 5264 6579280
fax: +49 (0) 5264 6579284
info@drendel.com
www.drendel.com

